

Návod na použitie Očného masážneho prístroja



1. ON/OFF
2. Tlačidlo na ovládanie teploty
3. Nízko-teplotná hrejivá terapia
4. Stredne teplotná hrejivá terapia
5. Vysoko-teplotná hrejivá terapia
6. Režim vibračnej masáže
7. Bluetooth svetlo
8. Kontrolka nabíjania

Návod na obsluhu:

1. Dlhو stlačte „tlačidlo ON/OFF“ na 2 sekundy, čím zapnete alebo vypnete zariadenie

2. Krátkym stlačením tlačidla „ON/OFF“ prepínate 3 režimy.

Automatický režim: Hrejivá terapia + masáž + hudba

Režim vitality: Masáž + hudba

Režim spánku: Hrejivá terapia + hudba

3. Krátko stlačte „Tlačidlo ovládania teploty“ pre zmenu teploty.

4. Dlhým stlačením tlačidla „Tlačidlo ovládania teploty“ na 2 sekundy upravíte hlasitosť hudby.

Úroveň hlasitosti: Nízka-Stredná-Vysoká-OFF

Každým dlhým stlačením môžete prepínať medzi rôznymi úrovňami hlasitosti

5. Bluetooth vyhľadávací názov EM-004

Dokáže prehrávať hudbu z mobilného telefónu po pripojení k bluetooth, potom je možné hlasitosť hudby nastaviť cez mobilný telefón.

Poznámka: Automatické vypnutie po 10 minútach.



Upozornenia ku prevádzke:

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte a dodržiavajte pokyny. Nezodpovedáme za následky spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním pokynov.

1. Nepoužívajte tento výrobok počas jazdy.
2. Prosím, nepoužívajte tento výrobok pri príliš vysokej teplote alebo v extrémne vlhkých podmienkach.
3. Ak máte ochorenie, poraďte sa s odborným lekárom a užívajte ho pod dozorom svojich príbuzných.
4. Vyhnite sa jej použitiu po pití alkoholu.
5. Pri používaní tohto produktu nenoste na použitých častiach tela iné zdravotnícke, kozmetické, zdravotnícke predmety a doplnky, aby ste predišli konfliktom a fyzickému zraneniu.
6. Napájací adaptér používajte v súlade s národnými normami a dbajte na elektrickú bezpečnosť.
7. Tento produkt je zdravotníckym zariadením pre domáce použitie, ktorý nie je vhodný na diagnostiku a liečbu.
8. Tento výrobok má funkciu ohrevu. Pre tých, ktorí nie sú citliví na teplo, buďte pri používaní opatrní.
9. Okamžite prestaňte používať, ak sa počas používania cítite nepríjemne.
10. Výrobok nepoužívajte v kúpeľni alebo inom vlhkom prostredí.
11. Výrobok nepoužívajte, ak je masírovaná časť tela poranená, je začervenaná a zapálená alebo je fyzicky abnormálna
12. Ak potrebujete zariadenie vyčistiť, utrite ho mäkkou čistiacou handričkou a udržiavajte produkt v suchu.